

Návod k použití respirátoru

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK RIZIKOVÉ TŘÍDY I - nesterilní (platí pro FFP2, FFP3)

Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů, použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele.

Před použitím čtěte návod k použití, prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličeji postupujte podle návodu.




Během používání respirátoru si nesahejte na oči ani obličeji. Nečistoty a viry mohou vniknout do těla také přes oční sliznici.

Pokud je respirátor označen **NR** nesmí být používán déle než jednu směnu.

Upozorňujeme na pravděpodobnou netěsnost,
jestliže se na dosedací ploše těsnící linie nachází vousy.

Určeno pro jednorázové použití.

Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -5 až +40°C

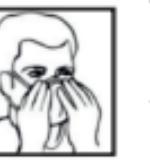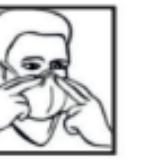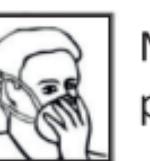

Nasazení respirátoru provádějte vždy s důkladně vyčištěnýma rukama, tak aby po celém obvodu co nejlépe přilnul k obličeji. Při sundání se dotýkejte pouze popruhů.

Při nasazování postupujte následovně:

- 1) Část respirátoru s nosní sponou přiložte na kořen nosu a obě poutka nasaděte za uši.
- 2) Usaděte respirátor těsně na bradu a okolo nosu tak, abyste se cítili co nejpohodlněji.
- 3) Opatrně vytvarujte nosní sponu tak, aby přilehla těsně k nosu a přizpůsobte respirátor tak, abyste dosáhli dobrého posazení těsnící linie na tváři.
- 4) Otestujte těsnost vydechnutím vzduchu skrz respirátor. Jestliže vzduch prochází kolem nosní spony nebo jinudy, musí být tato netěsnost odstraněna ještě před vlastním použitím.

Respirátor musí být vyměněn, jestliže:

- Prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátem.
- Došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.